


# Tip-Edge PLUS®

## Técnicas de Segmentação para o arco


# 1

Arco de Verticalização (.012" de níquel titânio) é passado pelos túneis dos braquetes incisivos centrais.

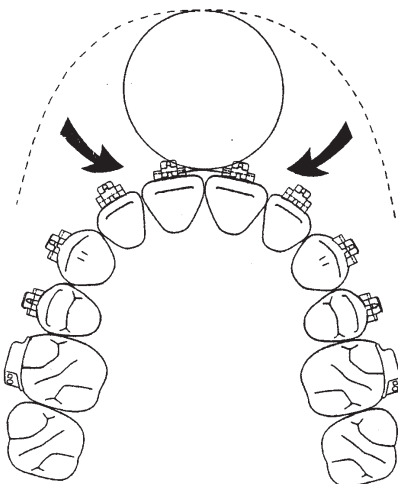


# 2

Como o arco de Verticalização se move distalmente pelos túneis, o loop da linha mediana se torna menor.

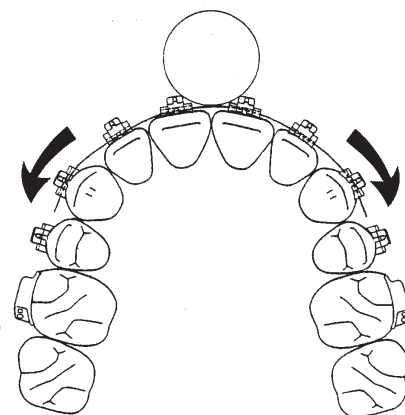


# 3

O arco de níquel titânio é finalmente passado pelos tubos gengivais redondos nos molares.

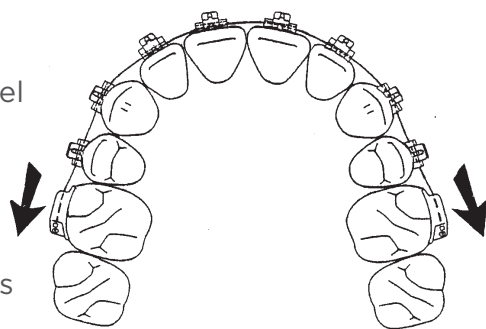

# 4

O arco principal pré-contornado de .022" x .028" é inserido nos tubos retangulares oclusais e ligado a todos os braquetes.

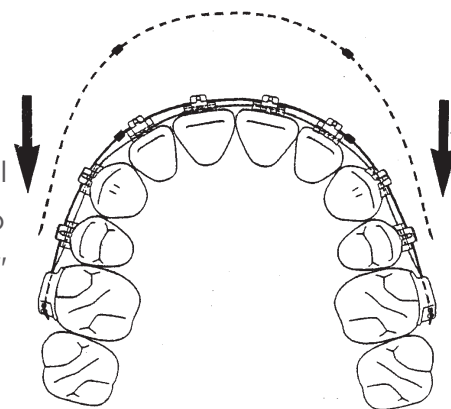

Para obter mais informações  
Consulte [plusbrackets.com](http://plusbrackets.com)



TP Orthodontics, Inc.

Innovators of Personalized  
Color-Matching Technology™